

# POKYNY K ODBĚRU



## PRO SPRÁVNÝ VÝSLEDEK TESTU...

...nejezte, nepijte, nežvýkejte žvýkačku a nekuřte 10 minut před odběrem.



1

Cílem je odebrat zadní sliny/hleny do odběrové zkumavky, na kterou nejprve našroubujte přiložený trychtýřek.



2




Důležité: Několikrát zakašlejte do roušky.

3

V ústech nashromážděte větší množství slin a několikrát je poválejte zepředu dozadu.

4

Přiložte trychtýřek ke rtům a plivejte dokud ve zkumavce nebude alespoň 1 cm tekuté části slin (tekutina bez pěny).

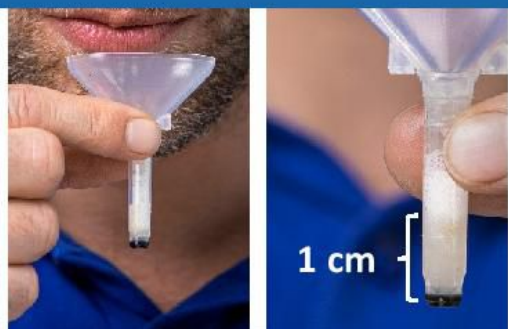

5



Odšroubujte trychtýřek a zahodte jej. Zkumavku pečlivě zašroubujte víčkem (jeho barva se může lišit od fotografie).

6

Zkumavku otřete dezinfekčním ubrouskem a odevzdejte.



Upozornění: Přesto, že odběrová sada je vyrobena ze zdravotně nezávadného polypropylenu, její součásti neolizujte ani nežvýkejte.